

ANSVARSRASKRIVELSE FOR PRODUKTER

Denne bøjle er et receptpligtigt produkt, der kun skal bruges i henhold til vejledningen og ekspertisen fra en autoriseret professionel i overensstemmelse med den henvisende læges behandlingsplan. Resultaterne kan variere afhængigt af faktorer som unik anatomi, alder, generel sundhed, overholdelse eller mangel på samme efter anvisninger fra producent/ sundhedspersonale/ læge. Thrive Orthopedics giver ingen specifikke anbefalinger vedrørende passende aktiviteter for brugeren af dette produkt. Du skal STRAKS stoppe brugen af dette produkt og søge lægehjælp, hvis du oplever ubehag, rødme, blå mærker, irritation eller vabler.

FREMSTILLET FOR THRIVE ORTHOPEDICS, LLC

- 📍 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032
- ☎ 484-442-0494
- 🌐 Thriveorthopedics.com
- ✉ sales@thriveorthopedics.com
- 📷 thriveorthopedics

Fremstillet i Kina 02/2021 - V.1

GARANTIBEGRÆNSNINGER

MEGET OMFATTENDE BRUG AF HUGSIDDENDE ELLER KNÆLENDE STILLING		
OVERBELASTNING AF FODPLADENS TÅSEKTION		
• GARANTIE DÆKKER KUN UÆNDRERE PRODUKTER, DER ER TILPASSET OG UDLEVERET AF LÆGER OG REGISTRERET I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE NEDENFOR • Patientvægt > 136 kg		

GARANTIREGISTRERING

Inden for 30 dage efter modtagelse af din enhed skal du besøge www.thriveorthopedics.com/warranty for at registrere dig mht. garantibeskyttelse. For sen registrering kan resultere i en ugyldig garanti.

GARANTI

Thrive Orthopedics LLC reparerer eller udskifter hele eller dele af enheden og dens tilbehør i tilfælde af materiale- eller håndværksdefekter i en periode på 6 måneder for tekstilvarer og 2 år for kulfiberkomponenten fra købsdatoen. Til garantikrav skal du bruge følgende:

- 🌐 www.thriveorthopedics.com/warranty
- ✉ sales@thriveorthopedics.com
- ☎ 484-442-0494
- ✉ 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

UDSKIFTNINGER

Udskiftningsstropper og -polstring kan købes via din praktiserende læge eller online på

www.thriveorthopedics.com

OPGRADERINGER

Thrives F3 Magnetic Strapping System har Fidlock™ magnetiske spænder med trækfaner, hvilket giver en nem og sikker måde at fastgøre og fjerne din bøjle på.

SÆRTILBUD

USD 10 I RABAT

INDTAST KODE SPÆNDE
VED KASSEN



F3 AFO PATIENTVEJLEDNING

Dynamisk feedback for ankelforfødsortose



 /Thrive Orthopedics AFO

FOR AT FÅ ADGANG TIL VIDEOINSTRUKTIONER

1 ANBRING BØJLEN I SKOEN

- ✓ Fjern oprindelig indersål
- ✓ Bøjlen skal passe i skoen, så skoen udsættes for mindst mulig deformation



2 SÆT INDERSÅLEN TILBAGE I SKOEN

- ✓ Placer din oprindelige indersål eller en brugertilpasset ortotisk indersål over bøjleens fodplade



3 KONTROLLÉR PASFORMEN

- ✓ Med skoene bundet op og løstsiddende skal du lade foden glide ind i skinnen (brug om nødvendigt skohorn)
- ✓ Sørg for, at der ikke er nogen forvrængninger af skoen, og fastgør snørebåndet



4 FASTGØR STROPPER

- ✓ Fastgør øvre og nedre stropper, så de er sikre, men ikke ubehageligt stramme



5 SIKKER

- ✓ Før brug skal du kontrollere, at pasformen er behagelig/sikker, og at der ikke er nogen indvirkning på sko eller produkt



6 TEST AF PASFORM OG KOMFORT

- ✓ Når bøjlen er helt på plads, skal du tage et par skridt for at sikre, at den er behagelig og har en sikker pasform. Hvis du føler ubehag, skal du straks underrette en sundhedsperson

VEJLEDNING I BRUG OG PLEJE

- Håndvask tekstilvarerne i varmt vand med mild sæbe
- Lufttørres ved stuetemperatur
- Må ikke maskinvaskes
- Må ikke tørres ved brug af kunstig varme
- Når den ikke er i brug, opbevares bøjlen i et moderat temperaturmiljø (10° - 26,7° C)

ADVARSLER



- Risikoen for ulykke under kørsel bestemmes fra sag til sag, og du bør altid konsultere din praktiserende læge og/eller læge, inden du bestemmer dine individuelle evner, når du bruger denne bøjle.
- Passende fodtøj: Dette produkt bør kun bæres med en sko, der har en lukket hæl og tå med mindst en hælhøjde på 2,54 centimeter eller som anvist af din sundhedsperson.
- Begrænset blodgennemstrømning - nerveparese og/eller begrænset blodgennemstrømning kan forekomme, hvis bøjlen er fastgjort for stramt.
- Afbryd straks brugen og kontakt din læge, hvis du oplever føleforstyrrelser eller usædvanlige reaktioner, mens du bruger dette produkt.
- Denne enhed er kun beregnet til enkeltpatientbrug.
- Dette produkt blev designet og fremstillet til at blive brugt udelukkende i kombination med de medfølgende eller licenserede udskiftningsstropper, puder, og andre tekstilvarer.
- Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal det rapporteres til producenten via de kontaktoplysninger, der er anført i dette dokument, og den rette myndighed i det land eller den stat, hvor du befinder dig.
- Når behandlingen er afsluttet, bortskaffes denne enhed i henhold til lokale love og forordninger.