

VEJLEDNING I BRUG OG PLEJE

- ✓ Håndvask tekstilvarerne i varmt vand med mild sæbe
- ✓ Lufttørres ved stuetemperatur
- ✓ Må ikke maskinvaskes
- ✓ Må ikke tørres ved brug af kunstig varme
- ✓ Når den ikke er i brug, opbevares bøjlen i et moderat temperaturmiljø (10° - 26,7° C)

UDSKIFTNINGER OG OPGRADERINGER

Udskiftning af og/eller opgradering af polstring og stropper kan købes hos din praktiserende læge eller online på

 www.thriveorthopedics.com

FREMSTILLET FOR THRIVE ORTHOPEDICS, LLC

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

 484-442-0494

 Thriveorthopedics.com


 sales@thriveorthopedics.com

 [thriveorthopedics](https://www.instagram.com/thriveorthopedics)


Fremstillet i Kina 02/2021 - V.1

GARANTIBEGRÆNSNINGER

HØJT
GEAREDE
HUGSIDDEN
DE ELLER
KNÆLENDE

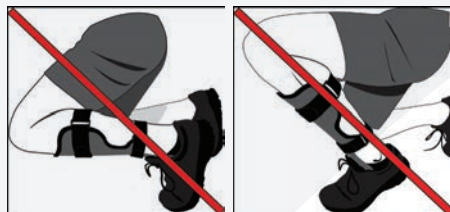

OVERBELASTNING AF
FODPLADENS TÅSEKTION

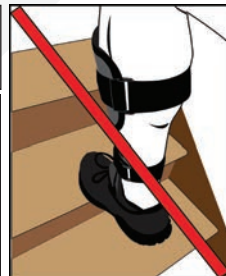

Garantien dækker kun uændrede produkter, der er tilpasset og udleveret af læger og registreret i henhold til instruktionerne nedenfor

GARANTIREGISTRERING


Inden for 30 dage efter modtagelse af din enhed skal du besøge www.thriveorthopedics.com/warranty for at registrere dig mht. garantibeskyttelse. For sen registrering kan resultere i en ugyldig garanti.

GARANTI

Thrive Orthopedics LLC reparerer eller udskifter hele eller dele af enheden og dens tilbehør i tilfælde af materiale- eller håndværksdefekter i en periode på 6 måneder for tekstilvarer og 2 år for kulfiberkomponenten fra købsdatoen. Til garantikrav skal du bruge følgende:

 www.thriveorthopedics.com/warranty

 sales@thriveorthopedics.com

 484-442-0494

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

ADVARSLER



- ⤴ Risikoen for ulykker under kørsel afgøres fra sag til sag, og du bør altid konsultere din alment praktiserende læge og/eller speciallæge, før du fastlægger dine individuelle evner, når du bruger denne bøjle
- ⤴ Passende fodtøj - Dette produkt bør kun bruges sammen med en sko med lukket hæl og tå og med en hælhøjde på mindst 10 - 15 mm i forhold til forfoden eller som anvist af din læge
- ⤴ Begrænset blodgennemstrømning - nerveparese og/eller begrænset blodgennemstrømning kan forekomme, hvis bøjlen er fastgjort for stramt
- ⤴ Hvis du oplever smerte, hævelse, følelsesændringer eller usædvanlige reaktioner, mens du bruger dette produkt, skal du stoppe brugen og straks kontakte din læge
- ⤴ Denne enhed er kun til brug for en enkelt patient - Slitage og uenigheder gør, at dette produkt er usikkert til brug for mere end én patient pr. produktlevetid
- ⤴ Dette produkt er designet og fremstillet til kun at blive brugt i kombination med de medfølgende eller licenserede erstatningsstropper, puder og andre tekstilvarer
- ⤴ Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal det rapporteres til producenten via de kontaktoplysninger, der er anført i dette dokument, og den rette myndighed i det land eller den stat, hvor du befinder dig
- ⤴ Når behandlingen er afsluttet, bortskaffes denne enhed i overensstemmelse med lokale love og bekendtgørelser




F3 AFO-UDBYDERVEJLEDNING

Dynamisk feedback for ankelforfødsortose



The **F3 DYNAMIC FEEDBACK AFO** er designet til at passe til en bred vifte af patienter uden at kræve ændringer. Hvis der kræves brugerdefinerede modifikationer, så de passer til en specifik patientanatomi, bedes du bruge ændringsvejledningen, der medfølger.

BEMÆRK VENLIGST: Brugerdefinerede ændringer anbefales ikke udtrykkeligt og kan gøre produktgarantien ugyldig.

 WWW.THRIVEORTHOPEDICS.COM

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- ✓ Tilpassede produktændringer bør kun udføres af en autoriseret ortoptist, ortopædisk bandagist eller tilsvarende autoriseret sundhedspersonale med passende uddannelse, sikkerhedsudstyr, erfaring, værktøjer og faciliteter til at udføre sådanne ændringer sikkert
- ✓ Passende sikkerhedsbriller, beskyttelseshandsker, beskyttelsesbeklædning og støvbeskyttelsesmasker eller ansigtsbeklædning bør altid bæres, når man foretager ændringer på enheden for at beskytte udsat hud, mund og øjne mod kulfibersplinter eller snavs
- ✓ Alle trimmede dele af enheden skal slibes professionelt og poleres til en glat finish og rengøres før patienttilpasning
- ✓ Patienter bør aldrig forsøge at ændre deres egne enheder, og sådanne patientændringer vil automatisk gøre produktgarantien ugyldig
- ✓ Patientvejledningen, der følger med denne enhed, bør gives til og gennemgås sammen med patienten

ANSVARSRASKRIVELSE FOR PRODUKTER

Denne bøjle er et receptpligtigt produkt, der kun skal bruges i henhold til vejledningen og ekspertisen fra en autoriseret professionel i overensstemmelse med den henvisende læges behandlingsplan. Resultaterne kan variere afhængigt af faktorer som unik anatomi, alder, generel sundhed, overholdelse eller mangel på samme efter anvisninger fra producent/sundhedspersonale/ læge. Thrive Orthopedics giver ingen specifikke anbefalinger vedrørende passende aktiviteter for brugeren af dette produkt. Du skal STRAKS stoppe brugen af dette produkt og søge lægehjælp, hvis du oplever ubehag, rødme, blå mærker, irritation eller vabler.

ÆNDRINGER AF FODPLADE





Kalkér patientens indlægssål over AFO-fodpladen



Ved brug af industriel blykskær eller en dremel-sav trimmes fodpladen til skabelonstørrelsen og trim ikke ud over det røde område

UDGLATNING & KANTNING

Alle trimmede sektioner skal slibes og poleres til en glat finish

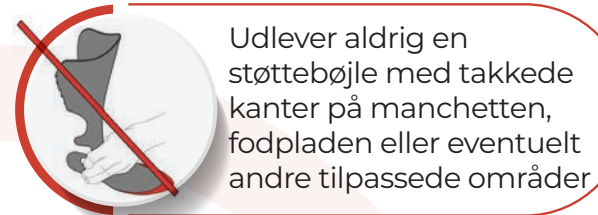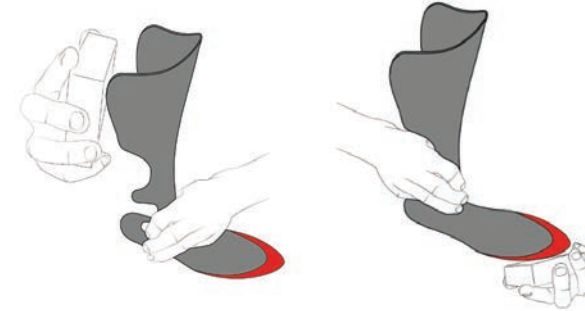

Udlever aldrig en støttebøjle med takkede kanter på manchetten, fodpladen eller eventuelt andre tilpassede områder

MANCHETÆNDRINGER



Fjern manchetspolstringen for at afdække røde trimdele



Trim røde vingesektioner til den ønskede bredde

PATIENTTILPASNING

Placer AFO under indlægssålen i patientens sko

Placer patientens indlægssål oven på fodpladen

Patientens sko skal have en lukket hæl og tå med mindst 10 - 15 mm hælhøjde i forhold til forfoden (nedsunken)

Hæлиндlæg kan bruges til at forbedre pasformen for sko, der har lidt eller ingen forfods-nedsænkning

Med snørebånd løsnet skal du lade patientens fod glide ind i skoen

Sørg for, at skoen har minimal forvrængning, og at fodpladen sidder lige på sålen

Fastgør snørebånd eller fastgør skoens fastgørelsesanordning

Før top- og bundstropper gennem D-ringe og fastgør dem med en krokodilleflig. Hvis stropperne er for lange, skal du fjerne krokodillefligen og trimme dem til passende længde. Fastgør krokodillefligen til den trimmede ende af stroppen

Tjek for korrekt pasform og komfortniveau

Der skal ingen kontakt være mellem bøjlen og patientens ankel



	EU DAMESKO-STØRRELSER	EU MANDESKO-STØRRELSER	FODPLADE-LÆNGDE (tommer)	BØJLE-HØJDE (tommer)
XS	36-39,5	37-39,5	8"-9"	13"
S	40-41,5	40-42,5	8 ³ / ₄ "-9 ³ / ₄ "	14"
M	42-44	43-44,5	9 ¹ / ₄ "-10 ³ / ₄ "	15"
L	44,5-46,5	45-47	10"-11"	16"
XL	47-49	48-49,5	10 ³ / ₄ "-11 ³ / ₄ "	17"

TILPASNINGSANBEFALINGER ER BASERET PÅ PRÆFABRIKEREDE STØRRELSER UDEN ÆNDRINGER

INDIKATIONER

Forfods-nedsænkning, fodklap og andre patologier relateret til bevægelsesvanskeligheder forbundet med tilstande som multipel sklerose, muskeldystrofi, traumatiske hjerneskader, Charcot-Marie-Tooth-sygdom, Guillain-Barré syndrom, akillesnedinose, post polio syndrom, slagtilfælde, cerebral parese, midtfods- og ankelartrose eller myelomeningocele.

KONTRAINDIKATIONER

- ✗ Patientvægt > 136 kg
- ✗ Sår på eller i nærheden af AFO-kontaktområder
- ✗ Moderat til alvorligt ødem
- ✗ Moderate til svære foddeformiteter
- ✗ Alvorlig ankelinstabilitet
- ✗ Plantarfleksion kontraktur
- ✗ Alvorlig fast ankel valgus eller varus
- ✗ Ikke-korrigerbar triplanar ustabilitet
- ✗ Løb og andre high-impact sportsgrene og aktiviteter
- ✗ Materialeallergi
- ✗ Svær spasticitet