

## ALLMÄN INFO

QuikDraw är en oerhört effektiv ländryggskorsett. Det stumma materialet i kombination med dragsystemet och ländryggsplattan ger en stabiliserande utväxling, avlastning och smärtlindring. Om ökat buktryck önskas kan QuikDraw kompletteras med magplatta (RAP). För ländryggssmärter är QuikDraw ett mycket effektivt hjälpmedel.

## FUNKTION

- Oelastisk ländryggskorsett
- Avlastning och smärtlindring av ländrygg
- Formbar ländryggsplatta
- Luftigt och hudvänligt material
- Dragband av stark, oelastisk polyetylen
- Magplatta som tillbehör för ökat buktryck

## INDIKATIONER

- Ländryggssmärter
- Diskbräck i nivå S1-L3
- Degenerativa diskar
- Postoperativ stabilisering
- Övrig ländryggsstabilisering

SE  
QuikDraw är en effektiv ländryggskorsett. För ländryggssmärter är QuikDraw ett mycket effektivt hjälpmedel.

# QuikDraw

## LÄNDRYGGSKORSETT



CE







EMBREIS

Embreis AB, Tumstocksvägen 11 A, S-187 66 Täby

Tfn + 46 8 410 621 00, info@embreis.com

www.embreis.com

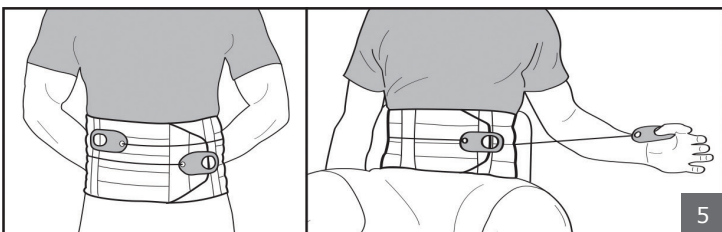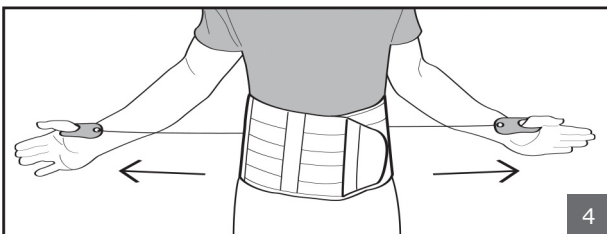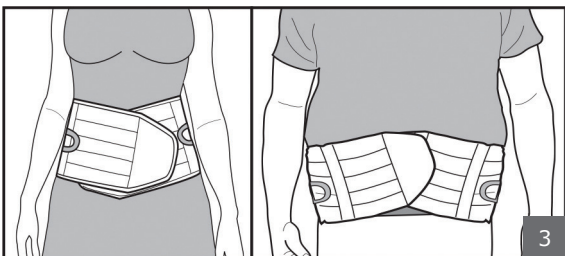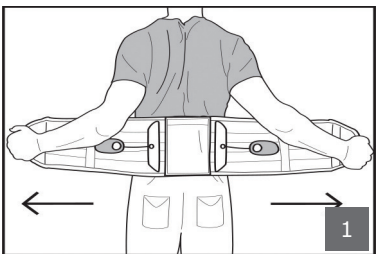

#### PLACERING

1. Placera ortosen mot ryggen fullt utdragen och se till att ryggplattan är centrerad.

2. Överlappa ortosen runt magen lagom tight med hjälp av kardborren. Ju tightare förslutning desto snabbare och bättre effekt fås av dragbanden.

3. Justera passformen vid behov genom att vinkla ändarna beroende på kroppens form.

#### JUSTERING OCH STABILITET

4. Sätt tummarna i dragbandets flikar. Tryck händerna utåt och sen runt kroppen och lås flikarna mot kardborren på framsidan av ortosen. Det vänstra dragbandet kontrollerar den lägre delen och det högra dragbandet kontrollerar den övre delen av ortosen.

5. Stabilitet och kompression regleras via dragbanden. Vid sittande kan dessa enkelt lossas för ökad komfort.

Art.nr Svart	Art. nr Vit	Storlek	Midjemått
993081	993080	x-small	53-69 cm
993011	993010	small	68-81 cm
993021	993020	medium	78-94 cm
993031	993030	large	91-107 cm
993041	993040	x-large	104-119 cm
993091	993090	xx-large	116-145 cm

Art. nr svart	Tillbehör
993200	RAP Magplatta, regular
993201	RAP Magplatta, large

#### Material

Bomull, nylon, foam

#### Tvättinstruktioner

Handtvätt 30°

