

## Sintex



### Bruksanvisning - Sintex axelslinga

Sintex är en axelslinga som passar höger och vänster sida och är tillverkad i fyra storlekar!

#### Applicering

1. Öppna upp kardborren för axelremmen. Placera underarmen i mitellan så att armbågen vilar mot den bakre kanten.
2. Ta axelremmen över den friska axeln. För in bandet genom söljan och fäst med kardborren. Justera längden på axelremmen genom att dra i änden på bandet.
3. Justera omfånget på midjebandet baktill efter att man fäst det på framsidan av mitellan. Längden anpassas genom att avlägsna kardborrelåset på framsidan av mitellan och klippa det till önskad längd. Midjebandet kan avlägsnas helt genom att dra det ut ur söljan

Om frågor kring produkten uppstår kontakta ansvarig ordinator, utprovare eller Embreis AB

**Storlek:** 1 - 4

**Material:** 100% Polyester



Färg: ●

Art.nr	Storlek	Längd underarm
SRT217M1	1	22-28 cm
SRT217M2	2	28-32 cm
SRT217M3	3	32-36 cm
SRT217M4	4	36-40 cm