

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- ✓ Pese pehmeät tuotteet käsin lämpimässä vedessä miedolla saippualla
- ✓ Anna kuivua huoneenlämmössä
- ✓ Älä pese pyykinpesukoneessa
- ✓ Älä kuivaa keinotekoisesti
- ✓ Kun tuki ei ole käytössä, säilytä sitä kohtuullisessa lämpötilassa (10–25 °C)

VAIHTO JA PÄIVITYKSET

Vaihtohihnoja ja/tai päivitettyjä pehmusteita ja hihnoja voi ostaa lääkäriltä tai verkosta osoitteesta

 www.thriveorthopedics.com

VALMISTETTU THRIVE ORTHOPEDICS, LLC:LLE

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

 484-442-0494

 Thriveorthopedics.com


 sales@thriveorthopedics.com

 [thriveorthopedics](https://www.instagram.com/thriveorthopedics)


Valmistettu Kiinassa 02/2021 - V.1

TAKUUN RAJOITUKSET

ERITTÄIN
SYVÄ
KYYKKY TAI
POLVISTUMI-
NEN

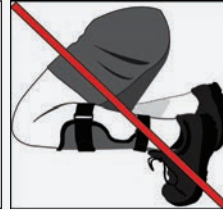

JALKALEVYN VARVASOSAN
RASITUS

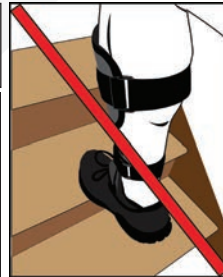

Takuu kattaa vain muuntelemattomat, lääketieteen ammattilaisten asentamat ja jakamat tuotteet, jotka on rekisteröity alla olevien ohjeiden mukaisesti

TAKUUN REKISTERÖINTI

Rekisteröi takuu 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta osoitteessa www.thriveorthopedics.com/warranty. Myöhäinen rekisteröinti voi mitätöidä takuun.

TAKUU

Thrive Orthopedics LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvirheellisen tuotteen ja sen lisävarusteet kokonaan tai osittain kuuden (6) kuukauden ajan (pehmeät tuotteet) ja kahden vuoden ajan (hiilikuitukomponentit) ostopäivästä. Lähetä takuuvaateet seuraavaan osoitteeseen:

 www.thriveorthopedics.com/warranty

 sales@thriveorthopedics.com

 484-442-0494

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

VAROITUKSET



- Onnettomuusriski ajon aikana määritetään tapauskohtaisesti. Keskustele aina etukäteen omista kyvyistäsi hoitajasi ja/tai lääkärin kanssa käyttäessä tätä tukea
- Sopivat jalkineet – Tätä tuotetta saa käyttää vain sellaisen kengän kanssa, jossa on suljettu kantapää- ja varvasosa ja jonka kantapää on vähintään 10–15 mm korkeudella tai terveydenhuoltopalveluiden tarjoajasi ohjeiden mukaisesti.
- Verenkierron hidastuminen – jos tuki on kiinnitetty liian tiukalle, voi aiheutua hermohalvaus tai verenkierto voi hidastua
- Lopeta käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, muutoksia aistimuksissa tai epätavallisia reaktioita
- Tämä laite on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön – Tuotteen kulumisen, repeytyminen ja muutokset tekevät tästä tuotteesta turvattoman käytettäväksi useammalle kuin yhdelle potilaalle tuotteen elinkaaren aikana
- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi vain yhdessä mukana toimitettujen tai lisensoitujen vaihtohihnojen, pehmusteiden ja muiden pehmeiden tuotteiden kanssa
- Jos laitteen käytön yhteydessä aiheutuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle tässä asiakirjassa ilmoitettuihin yhteystietoihin sekä sen maan asianmukaiselle viranomaiselle, jossa oleskelet
- Hoidon päättyttyä hävitä tämä tuote paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti



F3 AFO-OPAS PALVELUNTARJOAJALLE

Dynaaminen nilkan asentoa korjaava tuki



Dynaaminen F3 AFO on suunniteltu sopimaan monenlaisille potilaille vaatimatta mukautuksia. Jos tuotteeseen on tehtävä mukautuksia, jotta tuote sopii paremmin tietyn potilaan anatomialle, tutustu seuraaviin mukautusohjeisiin.

HUOMIOITAVAA: Mukautuksia ei kuitenkaan suositella ja ne voivat mitätöidä tuotteen takuun.

 WWW.THRIVEORTHOPEDICS.COM

TURVATOIMET

- ✓ Tuotetta saa mukauttaa vain lisensoitu apuvälineteknikko, proteesintekijä tai vastaava lisensoitu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on asianmukainen koulutus, suojavälineitä, kokemusta, työkaluja ja tilat tällaisten mukautusten turvalliseen tekemiseen
- ✓ Paljas iho, suu ja silmät tulee aina suojata hiilikuitusirpaleilta tai roiskeilta tuotteen mukautuksen aikana asianmukaisilla suojalaseilla, suojakäsineillä, suojavaatteilla ja pölyltä suojaavilla maskeilla tai kasvomaskeilla.
- ✓ Kaikki tuotteen leikatut kohdat on hiottava ammattimaisesti ja kiillotettava tasaiseksi ja puhdistettava ennen tuotteen sovittamista potilaalle
- ✓ Potilaat eivät saa koskaan yrittää muokata omaa tuotettaan, ja tällaiset muutokset mitätöivät tuotetakuun automaattisesti
- ✓ Tämän laitteen mukana toimitettava potilaan ohjeopas on annettava potilaalle ja luettava yhdessä potilaan kanssa

TUOTTEEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä tuki on reseptituote, jota saa käyttää vain laillistetun ammattikäyttäjän ohjauksessa ja asiantuntemuksella määräävän lääkärin hoitosuunnitelman mukaisesti. Tulokset voivat vaihdella eri tekijöiden, kuten yksilöllisen anatomian, iän, yleisen terveydentilan, valmistajan/hoitajan/lääkärin antamien ohjeiden noudattamisen tai laiminlyömisien mukaan. Thrive Orthopedics ei anna tämän tuotteen käyttäjälle erityisiä käyttösuosituksia. Lopeta tuotteen käyttö VÄLITTÖMÄSTI ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos olosi muuttuu huonoksi tai jos sinulla ilmenee punoitusta, mustelmia, ärsytystä tarakkuloita.

JALKALEVYN MUUTOKSET





Jäljennä potilaan pohjallinen AFO-jalkalevyllä



Leikkaa jalkalevy teollisilla peltisaksilla tai sopivalla sahalla mallin koon mukaan, äläkä leikkaa punaisen osan ulkopuolelle

TASOITUS JA HIOMINEN

Kaikki leikatut osat tulee hioa ja kiillottaa tasaiseksi

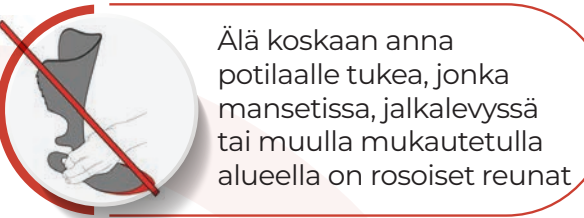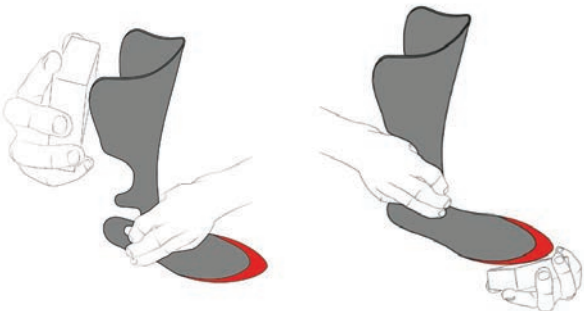

Älä koskaan anna potilaalle tukea, jonka mansetissa, jalkalevyssä tai muulla mukautetulla alueella on rosoiset reunat

MANSETIN MUKAUTUKSET



Avaa punaiset leikkausosat näkyville irrottamalla mansetin pehmuste



Leikkaa punaiset siipiosat haluttuun leveyteen

SOVITUS POTILAALLE

Aseta AFO potilaan kengän pohjallisen alle

Aseta potilaan pohjallinen jalkalevyn päälle

Potilaan kengässä tulee olla suljettu kantapää- ja varvasosio ja kengän kantapään tulee olla vähintään 10–15 mm korkeudella suhteessa jalkaterään (pudotus)

Istuvuutta voidaan parantaa kantapohjallisilla kengissä, joissa droppia on vain vähän tai ei lainkaan

Liu'uta potilaan jalka kenkään, kun kengännauhoja ei ole sidottu

Varmista, että kenkä ei ole vääntynyt ja että jalkalevy on suorassa pohjan päällä

Kiinnitä kengännauhat tai kiinnitä kengän kiinnityslaite

Syötä ylä- ja alahihnat D-renkaiden läpi ja kiinnitä tiukasti alligaattorikielekkeellä. Jos hihnat ovat liian pitkät, irrota alligaattorikieleke ja leikkaa hihnat sopivan pituisiksi. Kiinnitä alligaattorikieleke hihnan leikattuun päähän

Tarkista, että tuote istuu hyvin ja on mukava päällä

Tuote ei saa olla kosketuksissa tuen ja potilaan nilkan kanssa

	NAISTEN KENGÄN KOKO (EU)	MIESTEN KENGÄN KOKO (EU)	JALKALEVYN PITUUS (tuumaa)	TUEN KORKEUS (tuumaa)
XS	36-39,5	37-39,5	8"-9"	13"
S	40-41,5	40-42,5	8 ³ / ₄ "-9 ³ / ₄ "	14"
M	42-44	43-44,5	9 ¹ / ₄ "-10 ³ / ₄ "	15"
L	44,5-46,5	45-47,5	10"-11"	16"
XL	47-49	48-49,5	10 ³ / ₄ "-11 ³ / ₄ "	17"

SOVITUSSUOSITUKSET PERUSTUVAT ESIVALMISTETTUIHIN, MUKAUTTAMATTOMIIN KOKOIHIN

INDIKAATIOT

Riippunilkka, lättäjalka ja muut ambulatoriseen heikkouteen liittyvät sairaudet, kuten multipeliskleroosi, lihasdystrofia, traumaattiset aivovammat, Charcot-Marie-Tooth 'n tauti, Guillain-Barrén oireyhtymä, akillesjänteen tendinopatia, postpoliosyndrooma, aivohalvaus, CP-vamma, jalkapöydän ja nilkan nivelrikko tai myelomeningocele.

VASTAINDIKAATIOT

- ✗ Potilaan paino > 135 kg
- ✗ Haavaumat AFO-kosketusalueilla tai niiden lähellä
- ✗ Kohtalainen tai vaikea turvotus
- ✗ Kohtalaiset tai vaikeat jalkojen epämuodostumat
- ✗ Vaikea nilkan instabiliteetti
- ✗ Plantaarifleksio
- ✗ Vaikea vaivaisenluu tai nilkan kallistuminen sisäänpäin
- ✗ Ei-korjattavissa oleva triplanaarinen epävakaus
- ✗ Juoksu ja muut urheilulajit ja aktiviteetit, joissa jalkaan kohdistuu kova paine
- ✗ Allergia tuotteen materiaalille
- ✗ Vaikea spastisuus