

Användning och skötsel


Vid tvätt eller förvaring rekommenderar vi att kardborren knäpps för att undvika onödigt slitage. Produkten bör vid behov handtvättas i mild tvättmedel och droptorkas.

Garanti

Vid eventuell material- eller tillverkningsfel gäller 6 månaders garanti från inköpsdagen. Produkt som konstaterats vara defekt under normal och korrekt användning ersätts utan kostnad med samma vara.

Viktigt att tänka på

Om tryck eller obehag uppstår från ortosen beror det normalt på en felaktig applicering. Kontakta då utprovande enhet för justering.

Art.nr.	Storlek	Midjemått	Färg: <input type="checkbox"/>
993640	Universal	66 - 152 cm (upp till 178 cm med Vista Extension Panel, se nedan)	
Art.nr.	Tillbehör till Vista 464 Universal		
993405	Vista Extension Panel		

Material

Polyethylene, aluminium, nylon



10 November 2017 4:27 PM




För bästa behandlingsresultat rekommenderas att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdspersonal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta ansvarig ordinator, utprovare eller Embreis AB.


Produktinformation

Vista 464 TLSO stabiliserar ländrygg och brösttrygg efter skada eller operation. Utöver stabilisering är syftet att avlasta muskulatur och förhindra framåtböjning samt rotation av ryggen som kan vara skadlig. Viktigt att produkten är applicerad på rätt sätt för att ge maximal funktion och komfort.

Applicering

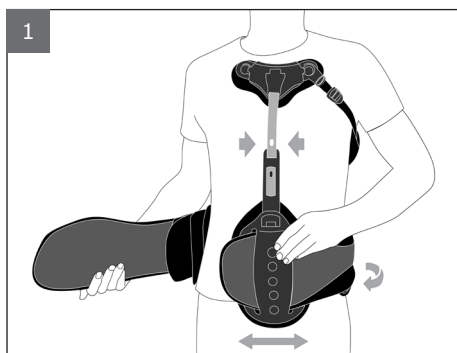


1. Placera magplattan mot buken och bröststaget centrerat mot bröstet. Överlappa med med den andra sidan av bånddelen och fäst mot kardborren. Bånddelen skall sitta tigt och bekvämt runt midjan.

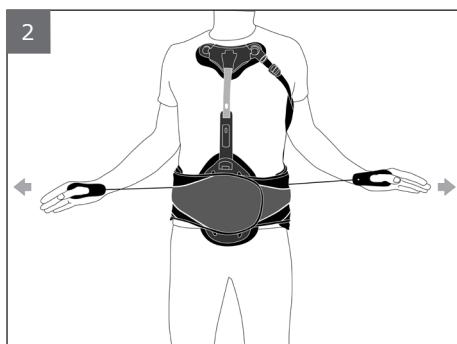


2. Trä tummarna igenom bandöggarna på respektive sida, skjut dem parallellt snett framåt och ut ifrån kroppen.

(Vid korrekt applicering reglerar det vänstra spännbandet kompressionen i den nedre delen av korsetten och det högra bandet kompressionen i den övre delen.)

När önskad kompression och stabilitet har uppnåtts placeras öggarna tillbaks på korsetten där de fäster med kardborre.

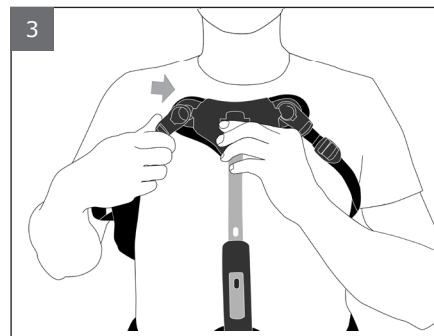

3. Fäst söljan i bröststaget. Placera polstringarna bekvämt nedanför armhålorna.

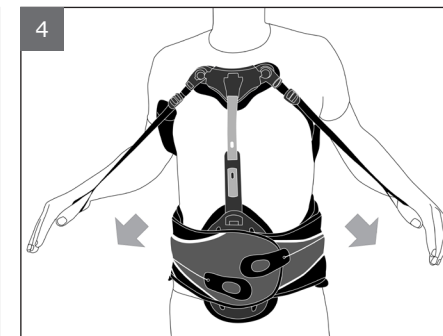

4. Dra spännbanden snett nedåt så att bröstplattan spänns mot bröstet. Om dom spänns för hårt kan dom enkelt släppas upp via respektive spänne och sen åter dras.



5. Bilden visar en korrekt applicerad Vista 464 TLSO. Den skall sitta stabilt och bekvämt och förhindra böjning/ flexion och rotation av ryggen.

Avtagning

För att ta av korsetten öppna spännet på den enda sidan enl. "bild 3", rekommenderat är din högra sida. Låt den andra sidan sitta kvar vilket förenklar påtagning. Öppna sedan upp bånddelen enl. "bild 1" och kom ur ortosen. Stäng bånddelen då ortosen inte används.