

# Vista CTO 4

Cervikal thorakal ortos

## ALLMÄN INFO

Vista CTO 4 är en cervikal thorakal ortos som används för optimal stabilisering av nacken och övre bröststryggen. Ortosen är i en universalstorlek, halsdelen är ställbar i sex olika höjder och MultiPost bakstycket är ställbart i tre olika vinklar för att säkerställa perfekt passform, stabilitet och komfort. Bröstdelen är ställbar i höjd och vinkel beroende på patientens längd och kroppsform. Ryggskenan är ställbar i höjdlöd och kan avlägsnas om patienten är sängliggande under längre tid. Fodret bör bytas och tvättas kontinuerligt för att bibehålla god hygien och motverka trycksår.

## FUNKTION

- Sex ställbara höjder av kragen
- MultiPost bakstycke
- Ställbar bröst- och ryggdel
- Extension, flexion och rotationsstabilitet
- Separat fram- och bakstycke
- Tvättbara/utbytbara foder
- Foder av foam och bomull håller huden torr
- Stor tracheotomi öppning
- Kan nedgraderas till Vista CTO 2 eller Vista MP
- MR kompatibel

## INDIKATIONER

- Cervikal thorakal stabilisering i nivå C1-T2
- Akuta skador
- Postoperativ stabilisering
- Degenerativa förändringar
- Övriga fall av cervikal thorakal stabilisering

Om frågor kring produkten uppstår, kontakta ansvarig ordinarör, utprovare eller Embreis AB.



Embreis AB, Svärdvägen 21, S-182 33 Danderyd. Tel: + 46 8 410 621 00

info@embreis.com

www.embreis.com

E65-6sid-CTO4FINAL140922


SE

Vista CTO 4 är en cervikal thorakal ortos som används för optimal stabilisering av nacken och övre bröststryggen.

# Vista CTO 4


## CERVIKAL THORAKAL ORTOS



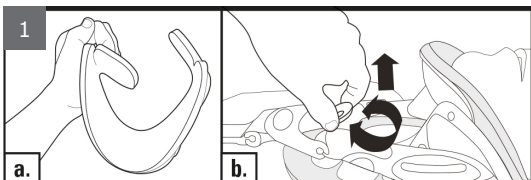


#### JUSTERING AV HALSKRAGE

- 1a.** Förforma kragen för att få en bra passform runt halsen.  
**1b.** Justera kragens höjd genom att dra ställknappen lätt utåt och rotera med eller motsols. Säkerställ att justerknappen faller tillbaka och låser sig i inställt höjdläge.

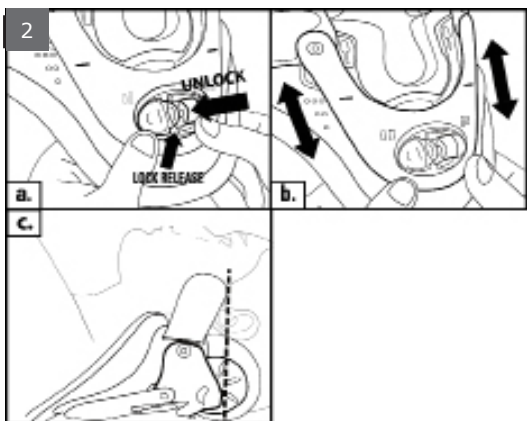


#### JUSTERING AV MP BAKSTYCKE

- 2a.** Justera bakstyckets vinkel och passform genom att trycka in den vita låsspärren och dra isär den gula låsknappen.  
**2b.** Välj en av tre vinklar för bästa passform och tryck därefter tillbaka den gula låsknappen.  
**2c.** Placera MultiPost bakstycket i enligt bilden.

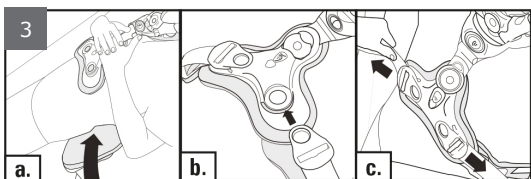


#### PLACERING AV RYGGPLATTA

- 3a.** Placera ryggplattan enligt bild.  
**3b.** Knäpp fast spännena på respektive sida om bröstplattan.  
**3c.** Spänn banden och justera polstringen för komfort.

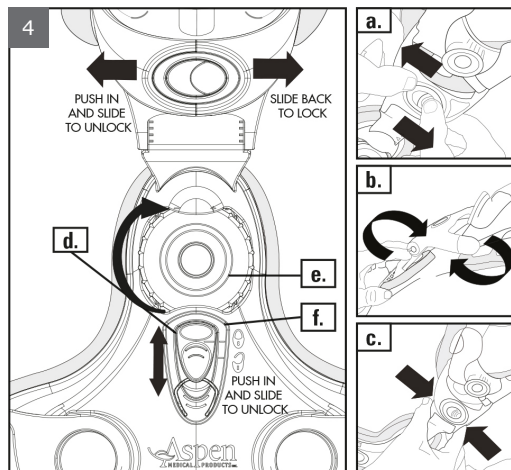


#### JUSTERING AV BRÖSTPLATTA

- 4a.** Frilägg thorakaldelen genom att trycka in knappen och dra isär byglarna på respektive sida.  
**4b.** Välj önskad vinkel och anläggningsyta mot kroppen.  
**4c.** Tryck ihop byglarna för att låsa bröstplattans vinkel.  
**3d.** Frilägg bröstplattans höjd genom att trycka ner låsspärren under den gula låsknappen och tryck sen den gula låsknappen nedåt.  
**4e.** Positionera bröstplattan till önskad nivå.  
**4f.** Tryck upp den gula låsknappen för att fixera höjden.

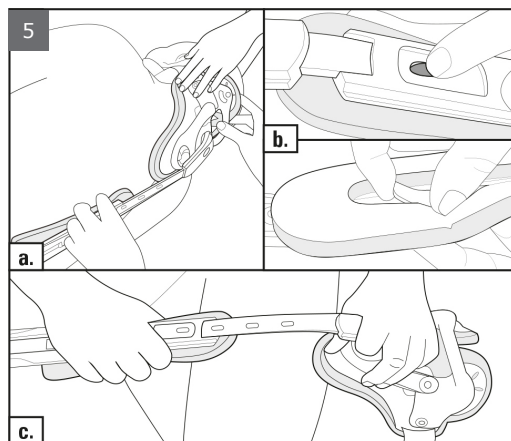

- 5a.** Om CTO4 skall appliceras i liggande läge, rulla patienten kontrollerat på sida.  
**5b.** Justera höjden på ryggskenan genom att lyfta låsknappen på skenans insida.  
**5c.** Aluminium skenan kan bockas för att anpassas exempelvis vid kyfos. Detta kan inte göras med ortosen på patienten.

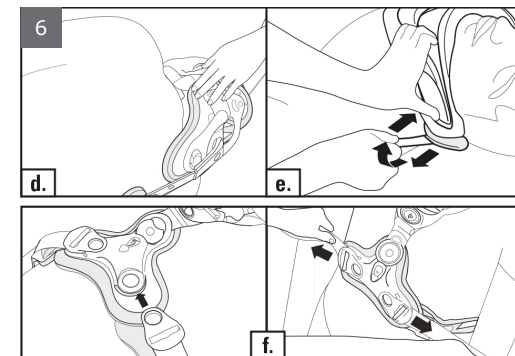

- 6d.** Rulla patienten kontrollerat åter på rygg.  
**6e.** Spänn kardborrebanden på respektive sida om halskragen.

#### JUSTERING AV RYGGPLATTA

- 6f.** Knäpp fast spännena på respektive sida om bröstplattan. Spänn banden och justera polstringen för komfort.

Art.nr	Benämning	Storlek
984550	Vista CTO 4	Universal

Art. nr	Tilbehöver till Vista CTO
984520	Foamset Vista CTO

#### Material

HDPE Polyetylen, Bomull, Foam