

ALLMÄN INFORMATION

Vista CTO är en cervikal thorakal ortos, som bygger på Vista kragen. Den är universal för både nacke och bröst. Kragen är ställbar i sex olika höjder och bröstdelen är ställbar i höjd och omfång. Vista ortosen används för att stabilisera höga thorakala skador samt komplexa cervikala skador. Fodret är utbytbart och bör tvättas för att bibehålla god hygien och tryckavlastning. Ortosen är MR kompatibel.

FUNKTION

- Sex ställbara höjder av kragen
- MultiPost bakstycke
- Ställbar bröstdel
- Separat fram och bakstycke
- Kragens design motverkar trycksår
- Tvättbara och utbytbara foder
- Stor tracheotomi öppning
- MR kompatibel
- Kan uppgraderas till Vista CTO 4

INDIKATIONER





- Cervikal thorakal stabilisering i nivå C1-T2
- Akuta skador
- Postoperativ stabilisering
- Degenerativa förändringar
- Övriga fall av cervikal thorakal stabilisering

Om frågor kring produkten uppstår kontakta ansvarig ordinator, utprovare eller Embreis AB.

Vista CTO

CERVIKAL THORAKAL ORTOS



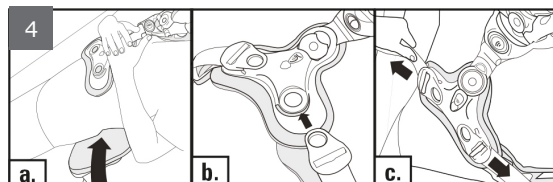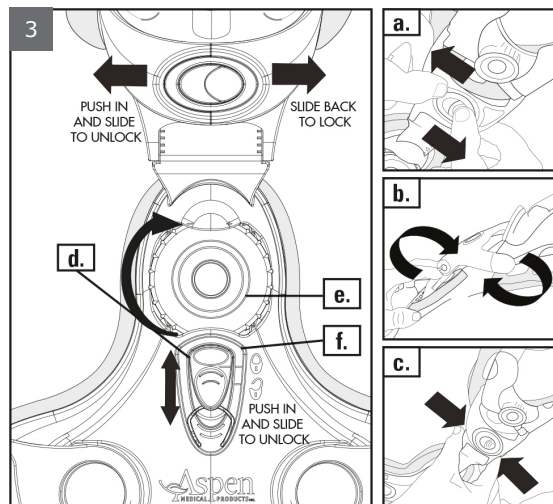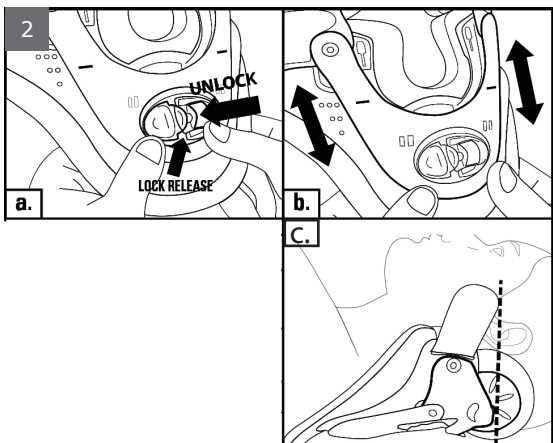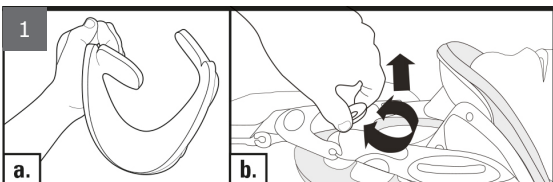

1. JUSTERING AV HALSKRAGE

1a. Förforma kragen för att få en bra passform runt halsen.

1b. Justera kragens höjd genom att dra ställknappen lätt utåt och rotera med eller motsols. Säkerställ att justerknappen faller tillbaka och låser sig i inställt höjdläge.

2. JUSTERING AV MP BAKSTYCKE

2a. Justera bakstyckets vinkel och passform genom att trycka in den vita låsspärren och dra isär den gula låsknappen.

2b. Välj en av tre vinklar för bästa passform och tryck därefter tillbaka den gula låsknappen.

2c. Placera MultiPost bakstycket i enligt bilden.

3. JUSTERING AV BRÖSTPLATTA

3a. Frilägg thorakaldelen genom att trycka in knappen och dra isär byglarna på respektive sida.

3b. Välj önskad vinkel och anläggningsyta mot kroppen.

3c. Tryck ihop byglarna för att låsa bröstplattans vinkel.

3d. Ställ in bröstplattans höjd genom att trycka ner låsspärren under den gula låsknappen och tryck sen den gula låsknappen nedåt.

3e. Positionera bröstplattan till önskad nivå.

3f. Tryck upp den gula låsknappen för att fixera höjden.

4. PLACERING AV RYGGLATTA

4a. Placera ryggplattan enligt bild.

4b. Knäpp fast spännena på respektive sida om bröstplattan.

4c. Spänn banden och justera polstringen för komfort.

Art.nr	Benämning	Storlek
984510	Vista CTO	Universal

Art. nr	Tilbehöver till Vista CTO
984520	Foamset Vista CTO

Material

HDPE Polyetylen, Bomull, Foam



◀ Vista CTO har MultiPostbakstycke som är ställbart i tre vinklar för att ge en perfekt passform och avlastning av nacken.