

## Pesuohjeet

- The Heal-Up Heel Relief Boot voidaan pestä pyykinpesukoneessa miedolla pesuaineella 40 °C:n villaohjelmassa. **ÄLÄ KÄYTÄ HUUHTELUAINETTA, ÄLÄ KÄYTÄ KLOORIA**
- Varmista, että kaikki koukku- ja silmukkahihnat on suljettu eikä koukkuja ole näkyvissä. Näin kangashiukkaset eivät vahingoita koukkukiinnityksiä.
- Kun poistat tuotteen pesukoneesta, avaa kaikki hihnat ja kuivaa kuivaustelineellä. Pidä etäällä lämmönlähteistä.
- Kun tuote on täysin kuiva, varmista, että Heal-Up-täyte on jakautunut tasaisesti koko jalkineeseen.
- Silitys kielletty, kuivapesu kielletty
- Tarkasta koukkukiinnitykset ja puhdista kaikki kerääntynyt kangas tai nukka, sillä se voi heikentää hihnojen kiinnitystehoa ja Heal-Up-tuotteen yleistä toimintaa.



Käsitelty Agion ja Silvadur antimikrobiaineella bakteerien kasvun ehkäisemiseksi.



Lue sovitushjeet skannaamalla QR-koodi

[www.heal-up.co.uk](http://www.heal-up.co.uk)