



Put the cover use a shoehorn

**! Always use with the FOOT COVER**

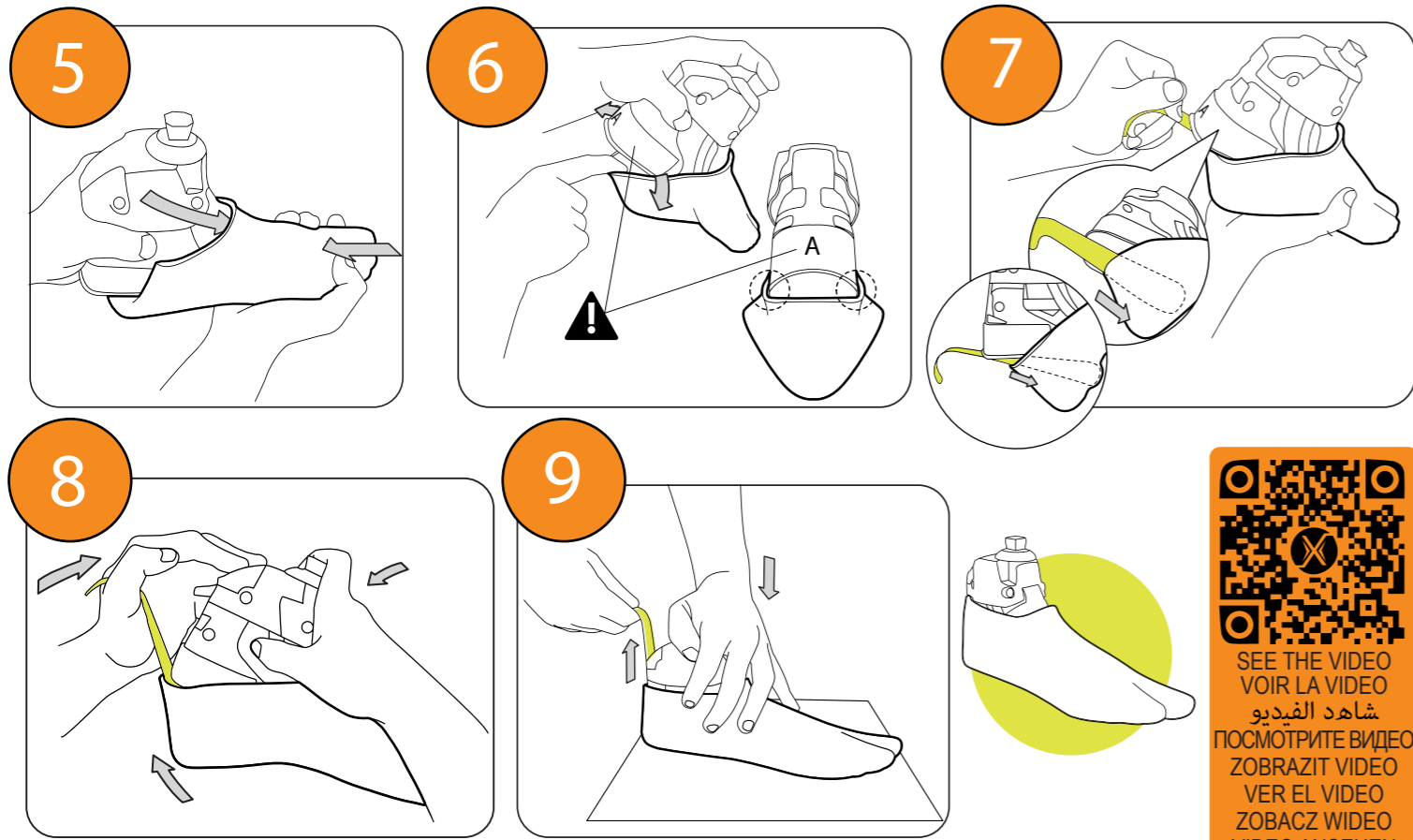


SEE THE VIDEO  
VOIR LA VIDEO  
شاهد الفيديو  
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО  
ZOBRAZIT VIDEO  
VER EL VIDEO  
ZOBACZ WIDEO  
VIDEO ANSEHEN

Remove the cover use a shoehorn

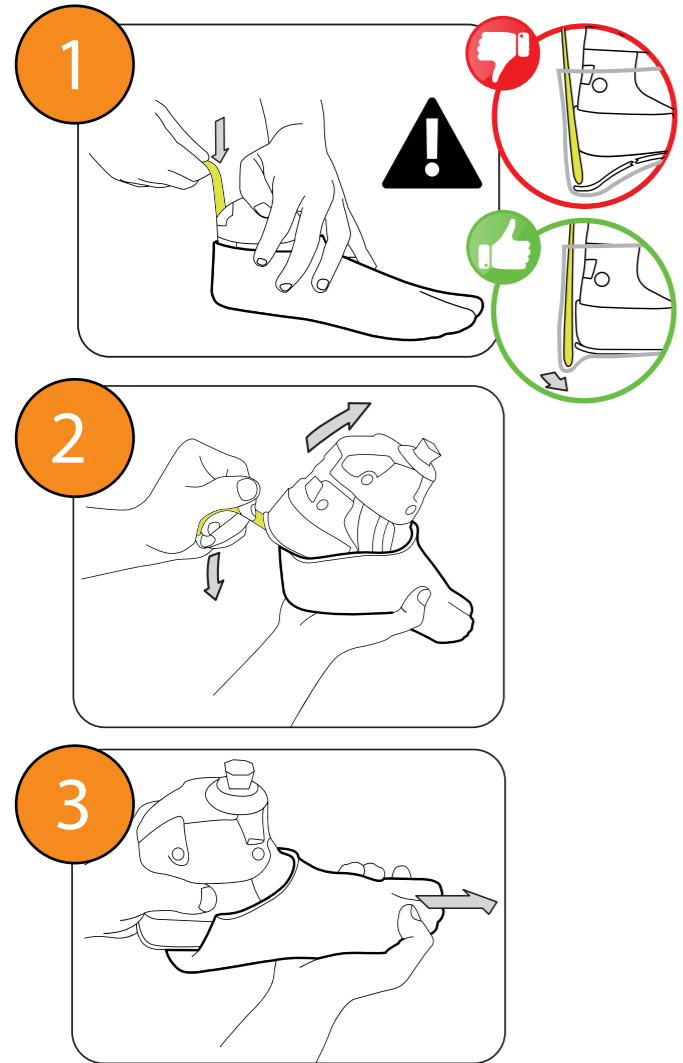

Alignment of the prosthetic foot

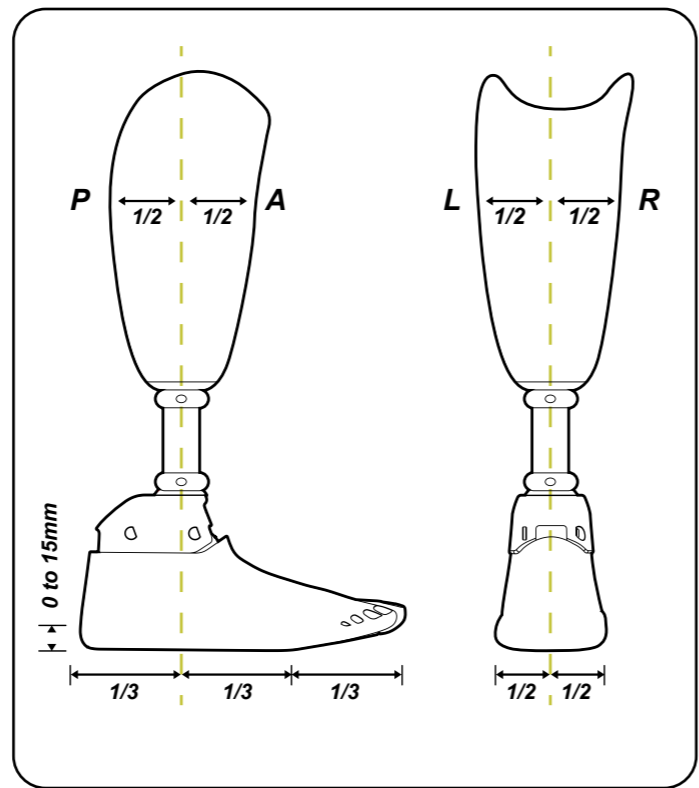

upya  
by exoneo




WARNING ! / ATTENTION ! / حذاري / ВНИМАНИЕ ! / POZOR ! / ATENCIÓN ! UWAŻAJ ! / ACHTUNG !  
Keep / Conserver / احتفظ / держать / Mějte /  
Mantener / Uwaga ! Keep ! / Aufbewahren !

**! Don'ts**

<p><b>DO NOT RUN</b> even if you run like the Flash</p> <p><b>NE PAS COURIR</b> même si vous courez comme Flash</p> <p>لا تركض حتى لو كنت تركض مثل فلاش</p> <p><b>НЕ БЕГАТЬ</b> Даже если вы бегаеете как Flash</p> <p><b>NEBEZPEČÍ</b> i když běžíte jako Flash</p> <p><b>NO CORRE</b> incluso si corres como Flash</p> <p><b>NIE URUCHAMIAJ</b> nawet jeśli działasz jak Flash</p> <p><b>NICHT RENNEN</b> auch wenn Sie wie Flash laufen</p>	<p><b>DO NOT JUMP</b> even if you jump like Super Mario</p> <p><b>NE PAS SAUTER</b> même si vous sautez comme Super Mario</p> <p>لا تقفز حتى لو كنت تقفز مثل سوبر ماريو</p> <p><b>НЕ ПРЫГАТЬ</b> Даже если вы прыгаете как Супер Марио</p> <p><b>NEJLEPŠÍ</b> i když skáčete jako Super Mario</p> <p><b>NO SALTES</b> incluso si saltas como Super Mario</p> <p><b>NIE SKOK</b> nawet jeśli skaczesz jak Super Mario</p> <p><b>NICHT SPRINGEN</b> auch wenn Sie wie Super Mario springen</p>	<p><b>DO NOT CLIMB</b> even if you climb like Spiderman</p> <p><b>NE PAS GRIMPER</b> même si vous grimpez comme Spiderman</p> <p>لا تتسلق حتى لو كنت تتسلق مثل الرجل العنكبوت</p> <p><b>НЕ ЛАЗАТЬ</b> Даже если вы лазаете как Человек-паук</p> <p><b>NEPOUŠTĚJTE</b> i když lezete jako Spiderman</p> <p><b>NO ESCALAR</b> incluso si escalas como Spiderman</p> <p><b>NIE WSPINAJ SIĘ</b> nawet jeśli wspinasz się jak Spiderman</p> <p><b>NICHT KLETTERN</b> auch wenn Sie wie Spiderman klettern</p>
--	--	--

**3 versions of the foot, choose the most suitable one :**

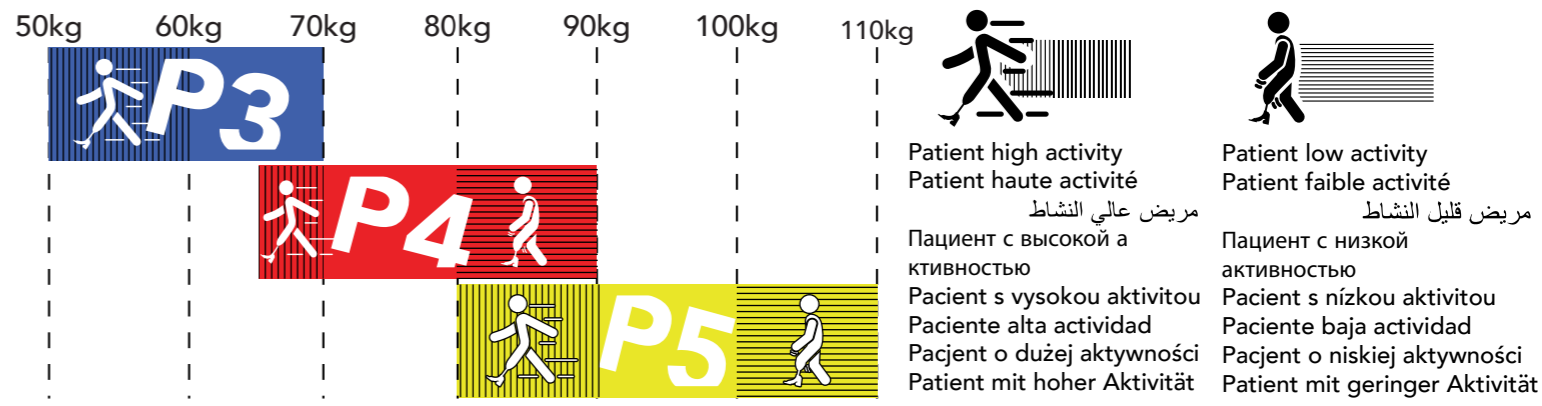

**NOTE:** during the first use, some normal set up noises could appear. These noises disappear after few hours.

**NOTE:** lors de la première utilisation, des bruits de mise en place peuvent apparaître. Ces bruits disparaissent après quelques heures.

**ملاحظة:** أثناء الاستخدام الأول، قد تظهر بعض أصوات الخفيفة عند أول خطوات. تختفي هذه الأصوات بعد ساعات قليلة.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании может появиться легкий звук (скрип), который исчезнет через несколько часов.

**POZNÁMKA:** během první montáže a zkoušky chodidla pacientem se mohou projevit zvuky, které po několika hodinách chůze vymizí.


**NOTA:** Cuando se utiliza por primera vez, pueden aparecer ruidos de configuración. Estos ruidos desaparecen al cabo de unas horas.

**UWAGA:** Podczas pierwszego użycia mogą pojawić się niepożądane dźwięki. Powinny ustąpić po używaniu w pierwszych godzinach.


**HINWEIS:** Bei der ersten Verwendung können einige normale Einrichtungsgeräusche auftreten. Diese Geräusche verschwinden nach einigen Stunden.

# Assembly instructions


## Contains

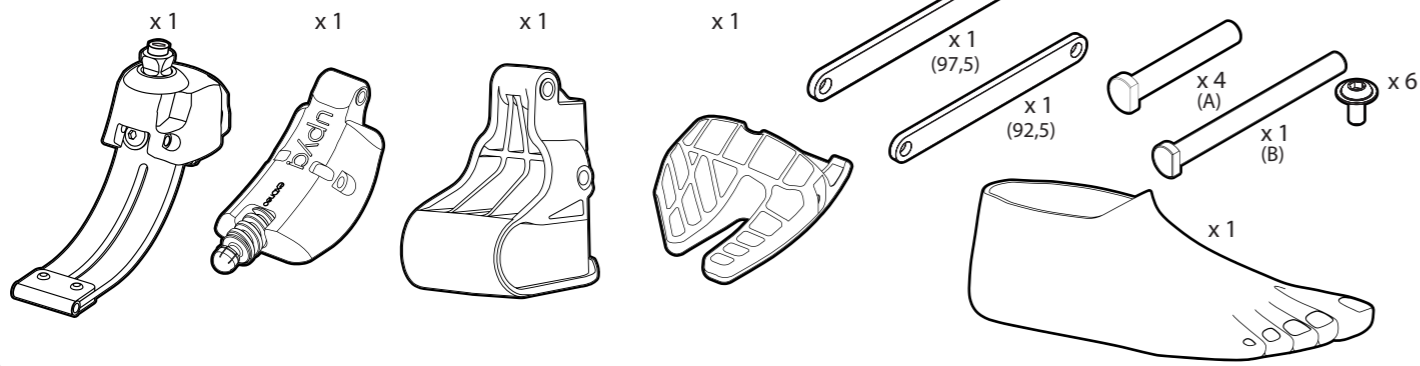

## Axis insertion direction

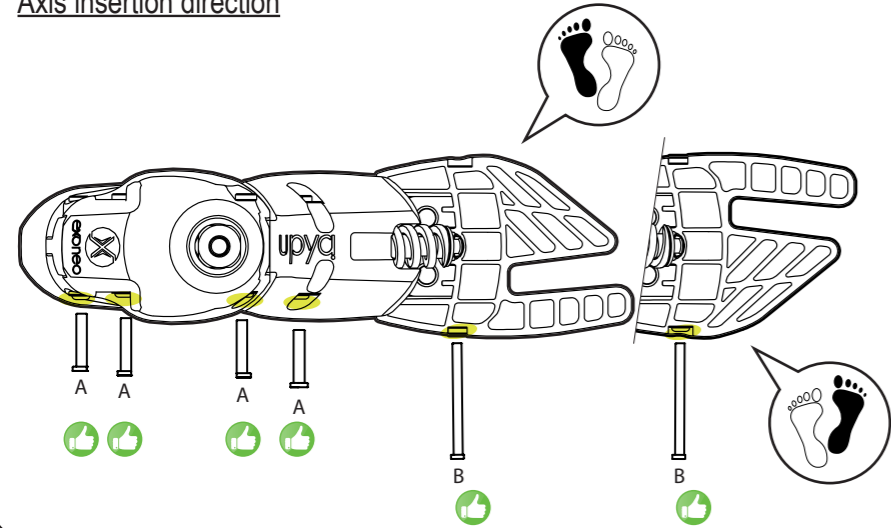

## Axis flat side

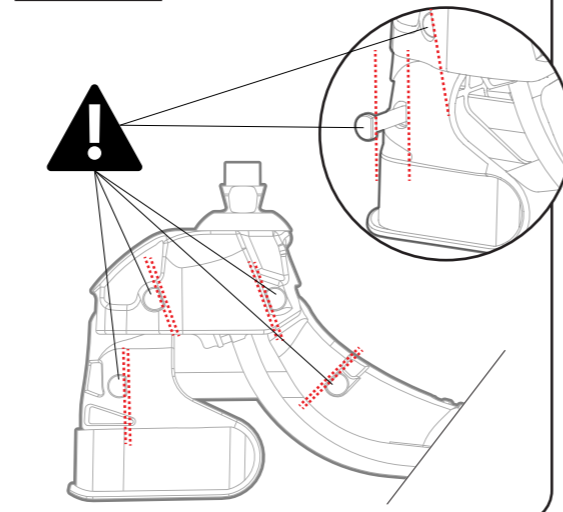


## Adjusting the length of the foot



Foot size	Bar	Forefoot
25 cm	92.5	25
26 cm	92.5	26
27 cm	92.5	<del>25</del>
28 cm	97.5	<del>25</del>

## Forefoot

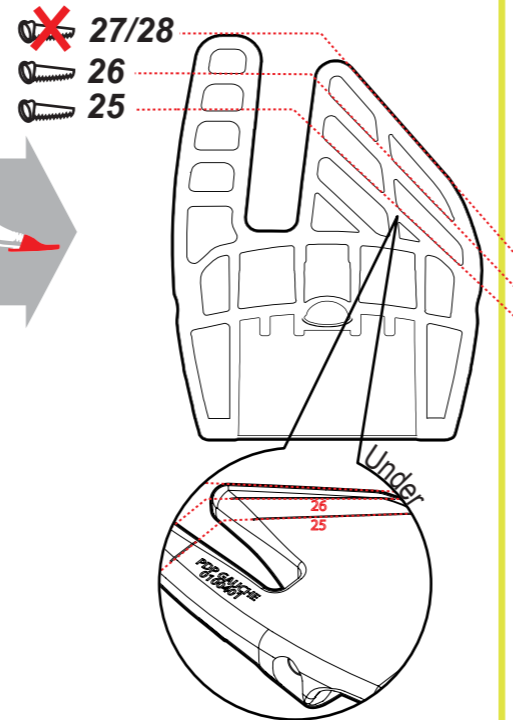

## Bar (scale 1)

