
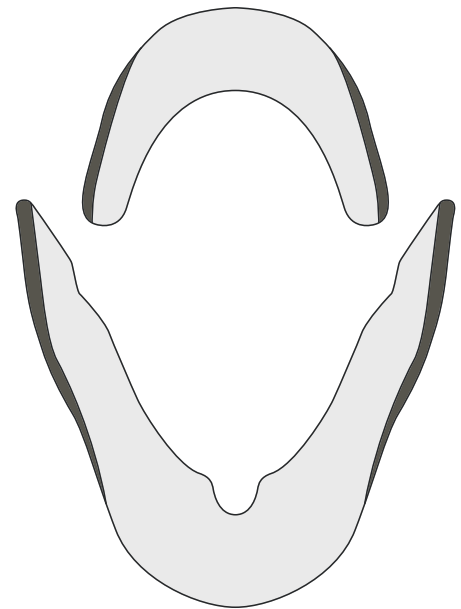




# Aspen Vista™ -kaulatuen pehmusteen vaihto- ja pesuohjeet

## Pehmusteen irrottaminen

Irrota kaulatuen etukappaleen pehmusteet vetämällä ne irti tarranauhapisteistä, joilla ne kiinnittyvät muovin.

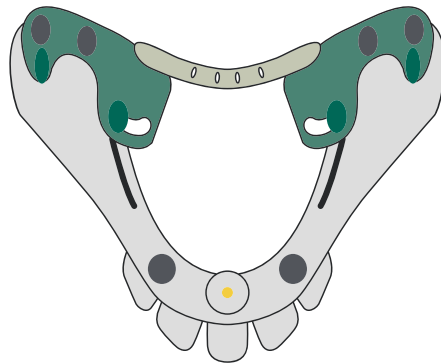

Takapaneelin pehmusteiden irrottamiseksi on ensin avattava hihnat molemmilta puolilta. Työnnä hihnat pehmusteen raoista ja sitten muovin ulkoreunan aukoista.

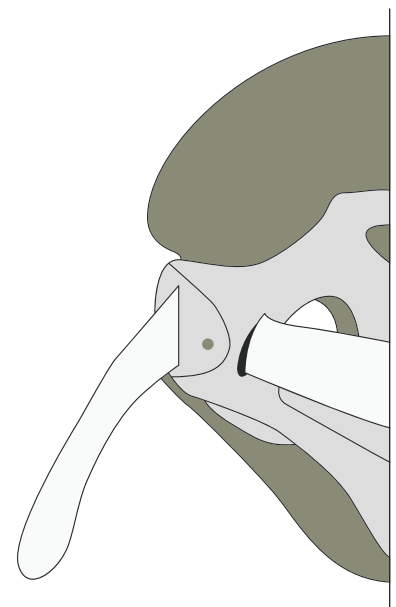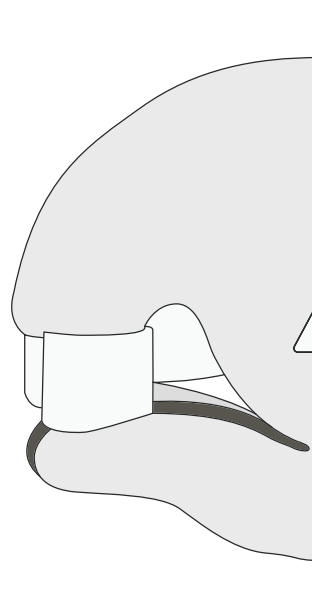


## Pehmusteen pesu

Pese Vista-kaulatuen pehmusteet käsin vedellä ja saippualla. Huuhtelee kaikki saippua pois. Purista ylimääräinen vesi varovasti. Anna kuivua ilmastavasti (tavallisesti 6–8 tuntia). **Älä laita pehmusteita pyykinpesukoneeseen tai kuivausrumpuun.**


# Pehmusteiden kiinnittäminen

Kaikki pehmusteet on tarkoitus asettaa harmaa puoli muovia kohti siten, että se tarttuu tarranauhapisteeisiin, ja valkoinen puoli potilasta kohti.

Kiinnitä kaulatuen etuosan pehmusteet kohdistamalla alempi (isompi) pehmuste sille tarkoitettuihin tarranauha-pisteisiin ja kaulatuen muovikehään.

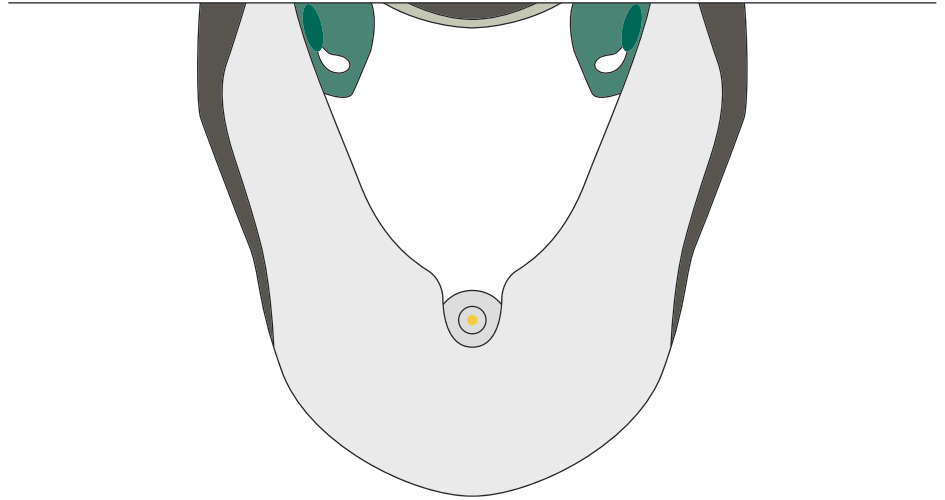

Varmista, että yläpehmusteen yläosa peittää muoviosien etu- ja takareunat.

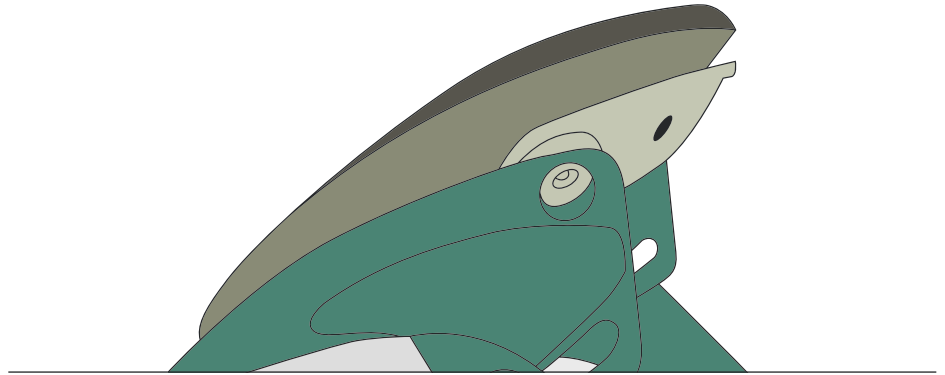

Aloita takapehmusteen asettaminen kiinnittämällä pehmusteen harmaa puoli takapaneelin tarranauhapisteeisiin. Kun pehmuste on kohdistettu oikein muoviosiin, vie hihnat uudelleen pehmusteen ja muovin aukkojen läpi.

