

Aspen
HALSKRAGE
NAKKEKRAGE
KAULUS

SE - Aspen barnhalskrage är speciellt utvecklad för barn och stabiliserar nacken efter trauma, operation eller kronisk sjukdom. Den är utvecklad för långtidsanvändning och ger barnet god komfort. Utformningen vid hakan, käkarna, bröst- och occipital benet avlastar oönskat tryck och motverkar trycksår. Det bomullsklädda skumfodret tar effektivt upp fukt och håller huden torr. Fodret kan enkelt bytas och tvättas för att bibehålla god hygien.

Om frågor kring produkten uppstår kontakta ansvarig ordinator, utprovare eller Embreis AB.



Embreis AB, Svärdvägen 21, S-182 33 Danderyd. Tel: + 46 8 410 621 00

info@embreis.com
www.embreis.com

SE/NO/FI

Aspen barnhalskrage är speciellt utvecklad för barn och stabiliserar nacken efter trauma, operation eller kronisk sjukdom.

Aspen


HALSKRAGE, BARN

NAKKEKRAGE
KAULUS



E65-6s:d-AspenHalskrageBarnFINAL140922



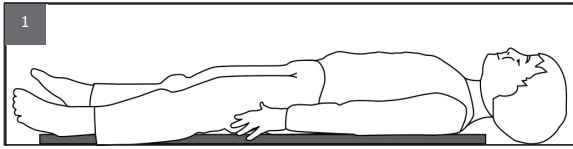

SE


1. Barnets längd, vikt och ålder påverkar korrekt passning av kragens storlek. Se storlekstabellen för beräkning av korrekt storlek.

NO

1. Et barns høyde, vekt og alder påvirker riktig tilpassing av cervical krage. Referer til størrelsesdiagrammet for å anslå den riktige størrelse.

FI

1. Lapsen korkeus, paino ja ikä vaikuttavat sopivaan kauluksen kokoon. Viittaa mitoitustaulukkoon sopivan koon arvioimiseksi.

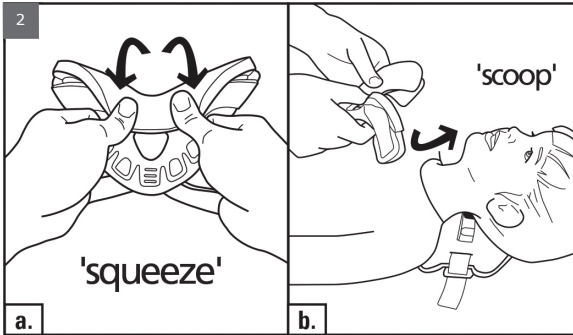

SE

2. Skjut den bakre panelen bakom halsen.

a. Tyck ihop kragen till hälften horisontellt.

b. För frampanelen uppåt och under hakan så att hakdelen ligger mot hakans främre kant. Dra upp sidorna över axlarna och placera den bakre panelens kardborreband löst på frampanelen.

NO

2. Skyv bakplaten bak nakken.

a. Klem kragen i to horisontalt.


b. Skyv frontplaten opp og under haken slik at hakestykket kommer til kanten av haken. Bring sidene opp over skuldrende og plasser bakplatenes borrelåser løselig på frontplaten for å holde den på plass.

FI

2a. Liu'uta takapaneeli kaulan taakse.

a. Purista kaulusta puoleksi vaakaasuoraan.

b. Kauhaa etupaneelia ylös jaleuan alta, jotta leukapala tulee leuan etureunaan. Tuo sivut ylös olkapäiden yli ja sijoita takapaneeli Velcro löysästi

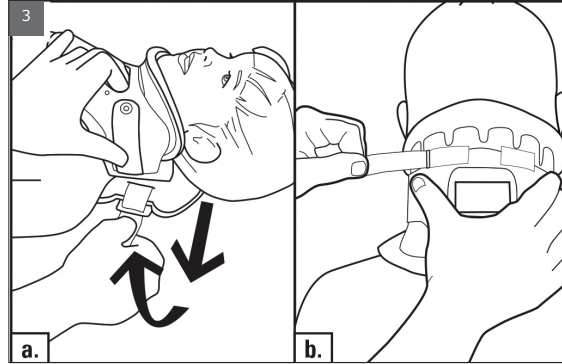

SE

3a. Håll hålet för struphuvudet med ena handen och dra i den bakre panelens kardborreband till det är helt sträckt. Fäst sedan den bakre panelens kardborreband på sidan av frampanelen. Upprepa detta på motsatt sida och växla sida tills kragen sitter säkert och är centrerad.

b. (Endast ej sängbundna patienter)

PD 3, PD 4 har PD 5 en supportrem för nacken på den bakre panelen. Justera den genom att trycka den bakre panelen mot halsen och dra i remmarna tills de är sträckta.

NO

3a. Mens du holder trach hullet med ene hånden, trekk bakplatenes borrelåser utover til all slakk er ute. Fest deretter bakplatenes borrelåser på siden av frontplaten. Gjenta på motsatt side, og alterer sider inntil kragen er sikker og sentrert.

b. (Kun Ambulatorisk) PD 3, PD 4 og PD 5 har en occipital støttestropp på bakplaten. Juster ved å klemme bakplaten mot nakken og dra i stroppene inntil all slakke er fjernet.

FI

3 a. Henkitorven aukkoa pitämällä yhdellä kädellä, kuori takapaneeli Velcro ulospäin, kunnes kaikki välykset on poistettu. Seuraava turvaa takapaneeli Velcro etupaneelin sivuun. Toista vastakkainen sivu ja vaihtele sivuja, kunnes kaulus on kiinnitetty ja keskitetty.

b. (Vain kävelytie) PD 3, PD 4 ja PD 5:llä on takaraivon tukihihna takapaneelilla. Säädä puristamalla takapaneelia kaulaan ja vetämällä hihnoja, kunnes kaikki välykset on poistettu.

Art.nr	Storlek	Kroppslängd	Omfång nacke
983190	PD1	53-84 cm	20-30 cm
983195	PD2	74-94 cm	22-33 cm
983106	PD3	84-102 cm	22-33 cm
983102	PD4	89-114 cm	28-42 cm
983104	PD5	94-122 cm	28-42 cm

Art.nr Tillbehör till Aspen Halskrage, Barn

983199	Foamset Aspen Halskrage, PD1-2
983155	Foamset Aspen Halskrage, PD3-5

Material

HDPE Polyetylen, Bomull, Foam

