

ANSVARSRISKRIVNING FÖR PRODUKTEN

Denna ortos är en förskrivna produkt som endast ska användas under vägledning och med expertis från en licensierad fackperson, i enlighet med den remitterande läkarens behandlingsplan. Resultaten kan variera beroende på faktorer som unik anatomi, ålder, allmänt hälsotillstånd samt om anvisningar från tillverkare/utövare/läkare följs eller åsidosätts. Thrive Orthopedics ger inga specifika rekommendationer angående lämpliga aktiviteter för användaren av denna produkt. Du bör OMEDELBART sluta använda denna produkt och uppsöka läkarvård om du upplever obehag, rodnad, blåmärken, irritation eller blåsor.

TILLVERKAD FÖR THRIVE ORTHOPEDICS, LLC

- 📍 387 Ridge Point Drive
Carmel, I 46032
- ☎ 484-442-0494
- 🌐 Thriveorthopedics.com
- ✉ sales@thriveorthopedics.com
- 📷 thriveorthopedics


Tillverkad i Kina 01/2022 - V.1

GARANTIBEGRÄNSNINGAR

VID DJUPA
KNÄBÖJ
ELLER
SITTANDE PÅ
HUK



VID ÖVERBELASTNING AV
FOTPLATTANS TÅDEL

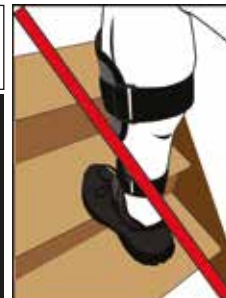

- WARRANTY GARANTIN täcker endast oförändrade produktpassformer och utlämnas av läkare och registreras enligt instruktionerna nedan
- Patientvikt > 136 kg

GARANTIREGISTRERING

Inom 30 dagar efter mottagandet av din enhet, besök www.thriveorthopedics.com/warranty för att registrera dig för garantiskydd. Vid registrering kan garantin bli ogiltig.

GARANTI

Thrive Orthopedics LLC kommer att reparera eller byta ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid material- eller tillverkningsfel under en period av 6 månader för mjukdelar och 2 år för kolfiberkomponenten från inköpsdatumet. För garantianspråk, kontakta oss via:

- 🌐 www.thriveorthopedics.com/warranty
- ✉ sales@thriveorthopedics.com
- ☎ 484-442-0494
- ✉ 387 Ridge Point Drive
Carmel, I 46032

ERSÄTTNINGSDELAR

Ersättningsremmar och -vaddering kan köpas via din läkare eller online på www.thriveorthopedics.com

www.thriveorthopedics.com

UPPGRADERINGAR

Thrives F3 magnetiska remsystem har Fidlock™ magnetiska spännen med dragflikar, vilket ger ett enkelt och säkert sätt att fästa och ta av din ortos.

SPECIALERBJUDANDE

10 USD [100 SEK] RABATT

ANGE KODEN BUCKLE
I KASSAN



F5 SPIRAL AFO PATIENTGUIDE

Dynamisk feedback främre ankel-fot-ortos



▶ /Thrive Orthopedics AFO

FÖR ATT KOMMA TILL
VIDEOINSTRUKTIONER

1 PLACERING AV ORTOS I SKO

- ✓ Ta bort ursprunglig innersula
- ✓ Ortosen ska passa in skon med minimal skoförvridning



2 SÄTT TILLBAKA INNERSULAN I SKON

- ✓ Placera din ursprungliga innersula eller anpassat inlägg över ortosens fotplatta



3 KONTROLLERA PASSFORM

- ✓ Med skorna oknutna och lösa, sätt i din fot *(använd skohorn vid behov)*
- ✓ Säkerställ att skon inte snedvrids och knyt skosnörerna



4 FÄST REMMAR

- ✓ Fäst övre och nedre remmarna så att de sitter fast säkert, men inte är obehagligt åtdragna



5 SÄKERSTÄLL

- ✓ Före användning kontrollera att passformen är bekväm/säker och att varken produkten eller sko är snedvriden



6 TEST FÖR PASSFORM OCH KOMFORT

- ✓ Ta ett par steg med ortosen på plats för att säkerställa komfort och säker passform. Om du känner obehag, meddela omedelbart sjukvårdspersonal

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Handtvätta mjukdelar i varmt vatten med mild tvål
- Lufttorka i rumstemperatur
- Tvätta inte i maskin
- Använd inte konstgjord värme för att torka
- Förvara stag i måttlig temperaturmiljö (10°-27°C) när den inte används.

FÖRSIKTIG ETSÅTGÄRDER



- Risken för olyckor under bilkörning bestäms från fall till fall och du bör alltid rådfråga din läkare innan du fastställer dina individuella förmågor när du använder denna ortos.
- Lämpliga skor: Denna produkt ska endast användas tillsammans med en sko som har en sluten häl och tå med minst 2,5 cm hög häl eller enligt anvisningar från din vårdgivare.
- Begränsat blodflöde – nervförlamning och/eller begränsat blodflöde kan uppstå om ortosen spänns åt för hårt.
- Avbryt omedelbart användningen och kontakta din läkare om du upplever några sinnesförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder produkten.
- Denna enhet är endast avsedd att användas av en patient.
- Denna produkt är endast utformad och tillverkad för användning i kombination med de medföljande eller licensierade ersättningsremmarna, -dynorna och andra mjukdelar.
- Om någon allvarlig händelse inträffar i samband med denna enhet, ska detta rapporteras till tillverkaren via kontaktinformationen som anges i detta dokument och den behöriga myndigheten i landet eller staten där du befinner dig.
- När behandlingen är klar, kassera denna enhet enligt lokala lagar och förordningar.