

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- ✓ Handtvätta mjukdelar i varmt vatten med mild tvål
- ✓ Lufttorka i rumstemperatur
- ✓ Tvätta inte i maskin
- ✓ Använd inte konstgjord värme för att torka
- ✓ Förvara stag i måttlig temperaturmiljö (10°-27°C) när den inte används.

ERSÄTTNING OCH UPPGRADERINGAR

Ersättning och/eller uppgraderad vaddering och remmar kan köpas från din läkare eller online på

 www.thriveorthopedics.com

TILLVERKAD FÖR THRIVE ORTHOPEDICS, LLC

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

 484-442-0494

 Thriveorthopedics.com



 sales@thriveorthopedics.com

 [thriveorthopedics](https://www.instagram.com/thriveorthopedics)


Tillverkad i Kina 02/2021 - V.1

GARANTIBEGRÄNSNINGAR

VID DJUPA
KNÄBÖJ
ELLER
SITTANDE
PÅ HUK

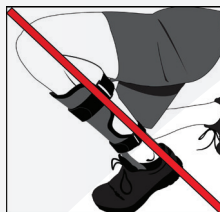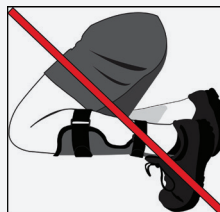

ÖVERBELASTNING I
FOTPLATTANS TÅDEL

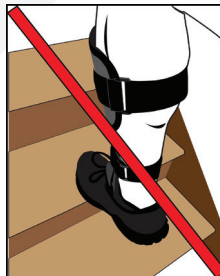

Garantin täcker endast oförändrade produktpassformer och utlämnas av läkare och registreras enligt instruktionerna nedan

GARANTIREGISTRERING

Inom 30 dagar efter mottagandet av din enhet, besök www.thriveorthopedics.com/warranty för att registrera dig för garantiskydd. Vid registrering kan garantin bli ogiltig.

GARANTI

Thrive Orthopedics LLC kommer att reparera eller byta ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid material- eller tillverkningsfel under en period av 6 månader för mjukdelar och 2 år för kolfiberkomponenten från inköpsdatumet. För garantianspråk, kontakta oss via:

 www.thriveorthopedics.com/warranty

 sales@thriveorthopedics.com

 484-442-0494

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



- Risken för olyckor under bilkörning bestäms från fall till fall och du bör alltid rådfråga din läkare innan du fastställer dina individuella förmågor när du använder denna ortos
- Lämpliga skor – Denna produkt ska endast användas tillsammans med en sko som har en sluten häl och tå med minst 10-15 mm hög häl i förhållande till främre delen av foten eller enligt anvisningar från din vårdgivare
- Begränsat blodflöde – nervförlamning och/eller begränsat blodflöde kan uppstå om ortosen spänns åt för hårt
- Om du upplever smärta, svullnad, sinnesförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder produkten, upphör omedelbart att använda produkten och kontakta din läkare
- Den här enheten är endast för engångsbruk – Produktens slitage och förändring gör produkten osäker att använda av mer än en patient under produktens livslängd
- Denna produkt är endast utformad och tillverkad för användning i kombination med de medföljande eller licensierade ersättningsremmarna, dynorna och andra mjukdelar
- Om något allvarlig händelse inträffar i samband med den här enheten ska det rapporteras till tillverkaren vid de kontaktuppgifter som anges i detta dokument och den behöriga myndigheten i landet eller staten där du befinner dig
- När behandlingen är klar, kassera denna enhet enligt lokala lagar och förordningar



Guide för F3 AFO-leverantörer

Dynamisk feedback främre ankel-fot-ortos



F3 DYNAMIC FEEDBACK AFO är utformad för att passa ett brett utbud av patienter utan att kräva några ändringar. Om anpassade ändringar krävs för att passa en specifik patient, använd ändringsguiden som följer.

OBSERVERA: Anpassade ändringar rekommenderas inte uttryckligen och kan häva produktgarantin.

 WWW.THRIVEORTHOPEDICS.COM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- ✓ Anpassade produktändringar ska endast utföras av en licensierad ortoped, protestekniker eller motsvarande licensierad sjukvårdspersonal med lämplig utbildning, säkerhetsutrustning, erfarenhet, verktyg och anläggning för att utföra sådana ändringar på ett säkert sätt
- ✓ Lämpliga skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddskläder och dammskyddsmasker eller ansiktsskydd bör alltid användas när enheten ändras för att skydda exponerad hud, mun och ögon från kolfiberflisor eller spillror
- ✓ Alla skurna/klippta delar av enheten måste slipas professionellt och poleras till en jämn yta och rengöras innan de sätts på patienten
- ✓ Patienter ska aldrig försöka ändra sin egen enhet och sådana ändringar leder till att garantin omedelbart hävs
- ✓ Patientinstruktionsguiden som medföljer denna enhet ska ges till och granskas tillsammans med patienten


ANSVARSRISKRIVNING FÖR PRODUKTEN

Denna ortos är en förskriven produkt som endast ska användas under vägledning och med expertis från en licensierad fackperson, i enlighet med den remitterande läkarens behandlingsplan. Resultaten kan variera beroende på faktorer som unik anatomi, ålder, allmänt hälsotillstånd samt om anvisningar från tillverkare/utövare/läkare följs eller åsidosätts. Thrive Orthopedics ger inga specifika rekommendationer angående lämpliga aktiviteter för användaren av denna produkt. Du bör OMEDELBART sluta använda denna produkt och uppsöka läkarvård om du upplever obehag, rodnad, blåmärken, irritation eller blåsor.

ÄNDRINGAR AV FOTPLATTAN




Spåra patientens innersula över AFO-fotplattan

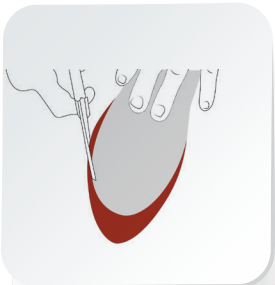

Använd industriell plåtsax eller en Dremel-såg, skär/klipp fotplattan till mallstorleken och trimma inte bortom röd sektion

UTJÄMNING OCH KANTNING

Alla skurna/klippta sektioner ska slipas och poleras till en jämn finish

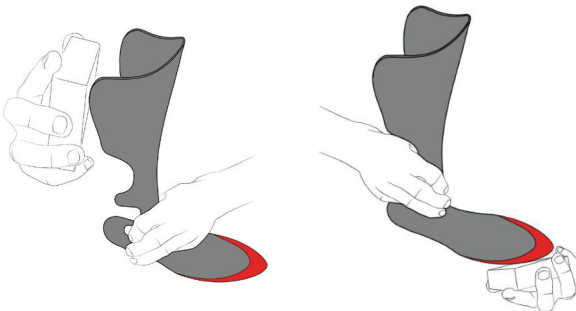

Lämna aldrig ut en ortos med taggiga kanter på manschetten, fotplattan eller något ändrat område

ÄNDRING AV MANSCHETT



Ta bort manschettstoppning för att ta fram delarna som ska skäras/klippas



Skär/klipp röda ytterdelar till önskad bredd

FORMANPASSNING TILL PATIENTEN

Placera AFO under innersulan på patientens sko

Placera patientens innersula ovanpå fotplattan

Patientens sko ska ha en sluten häl och tå med minst 10 - 15 mm hög häl jämfört med främre delen av foten (fall)

Hälinsatser kan användas för att förbättra passformen med skor som har inget eller litet fall

Med skosnörena lossade, skjut patientens fot i skon

Se till att skon har minimal förvridning och att fotplattan sitter rakt på sulan

Knyt skosnörena eller dra åt skons fästenhet

Mata toppen och botten övre och nedre banden genom D-ringarna och fäst ordentligt med en alligatorflik. Om remmarna är för långa, ta bort alligatorfliken och klipp till lämplig längd. Fäst alligatorflik på den klippta delen av remmen

Kontrollera korrekt passform och komfortnivå

Det ska vara noll kontakt mellan stötan och patientens fotled

	DAMSKO-STORLEKAR	HERRSTOR-LEKAR	FOTPLATTANS LÄNGD (tum)	ORTOSENS HÖJD (tum)
XS	36-39,5	37-39,5	8"-9"	33 CM
S	40-41,5	40-42,5	8 ³ / ₄ "-9 ³ / ₄ "	35,5 CM
M	42-44	43-44,5	9 ¹ / ₄ "-10 ³ / ₄ "	38,1 CM
L	44,5-46,5	45-47,5	10"-11"	40,6 CM
XL	47-49	48-49,5	10 ³ / ₄ "-11 ³ / ₄ "	43,2 CM

REKOMMENDERAD PASSFORM BASERAS PÅ PREFABRICERADE STORLEKAR UTAN ÄNDRINGAR

INDIKATIONER

Droppfot, fotslag och andra sjukdomar relaterade till rörelsenedsättningar i samband med tillstånd som multipel skleros, muskeldystrofi, traumatiska hjärnskador, Charcot-Marie-Tooth, Guillain-Barrés syndrom, akillestendinit, postpoliosyndrom, stroke, cerebral pares, mellanfots- och fotledsartros eller ryggmärgsbräck.

KONTRAINDIKATIONER

- ✗ Patientvikt > 136 kg
- ✗ Sår på eller nära AFO:s kontaktområden
- ✗ Måttligt till svårt ödem
- ✗ Måttliga till svåra fotdeformationer
- ✗ Hög instabilitet i fotled
- ✗ Plantarflexionkontraktur
- ✗ Svåra fasta valgus- eller varusförhållanden i ankeln
- ✗ Icke-korrigerbar triplanär instabilitet
- ✗ Löpning och andra sporter och aktiviteter som utsätter lederna för hög belastning
- ✗ Materialallergi
- ✗ Svår spasticitet